

FICHE REFLEXE : PROTECTION OCULAIRE ET RESPIRATOIRE : MASQUE COMPLET DE PROTECTION

Composition :

- Masque + Raccord + filtre hepa (PALL, Hydro-guard ; HME)



- Masque + tuba + pochette filtrante



- Coller une étiquette avec votre nom et prénom sur le raccord entre le filtre et le masque

Comment le mettre ?

- Réaliser une friction des mains à la SHA.
- Installer le masque en le prenant par les lanières.
- Vérifier l'étanchéité : inspirer en bouchant le filtre avec la main.
- Mettre une charlotte.

Comment l'enlever ?

Le masque est toujours retiré à l'extérieur de la chambre :

- Retirer la charlotte.
- Réaliser une friction des mains à la SHA.
- Retirer le masque par les lanières.
- Nettoyer avec une lingette l'extérieur du masque.
- L'accrocher sur le portique du secteur.
- Mettre un masque chirurgical.

Entretien en fin de service :

- Après le passage d'une lingette sur la face extérieure du masque le mettre à décontaminer dans les retours soins de chaque secteur.
- Retirer le filtre en exerçant un mouvement de « tourner - tirer » et jeter la pièce raccord et le filtre en DASRI.
- Jeter la pochette (DASRI), défaire le tuba.



Désinfection des masques par l'AS :

L'AS réalise une désinfection des masques de l'équipe d'avant.

- Trempage dans l'Hexanios 15 min.
- Rinçage.
- Séchage à l'air libre.